

サージカルマスク（ゴムひもタイプ）着用手順

©ICHG研究会 2004



1 マスクを取り出し、表裏を確認します。表裏の見分け方は金具を上にし、蛇腹が下向きになっているほうが表側です。



2 マスクの上部に金具が装着してあります。ゴムひもを耳にかけ、金具を自分の鼻の形にあわせて曲げます。



3 マスクの蛇腹を下へ引くと広がりますので、十分に鼻・口に密着させて覆うことができます。



マスクを着用すると医療者の顔が隠れ、患者に疎外感を与えやすくなることから、マスクは必要な時のみ着用してください。小児病院等では、患児のために笑顔で対応する事が望まれます。医療現場においては、紙マスク・ガーゼマスクは水分を浸透させ、飛沫が口元に染みるなど問題があるため使用しないでください。